

**Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata asennusohjetta.
Huolellinen asennus takaa turvallisen käytön.**

Pakettiin kuuluu:

- 1 kpl wc-korottaja
- 2 kpl kiinnitystalloja korottajan kiinnittämiseen

Et tarvitse työkaluja asentaessasi korottajaa.

Wc-korottaja sopii useimpiin wc-istuim malleihin



Asennuohjeet:

1. Poista rengas ja kansi wc-istuimestasi (useimissa malleissa irrotus tapahtuu nostamalla.)
2. Aseta kiinnitystallat wc-korottajan sivuille kuvan mukaisella tavalla. Kiinnitystalla asennetaan siten, että aseta talle wc-korottajan alareunassa olevaan koloon ja paina kevyesti. Kierrä kiinnitystallan ruuvista jolloin se liikkuu sisäänpäin.
3. Aseta korottaja wc-istuimen päälle
4. Kiristä kiinnitystallat kiertämällä ruuveja, jolloin tallat painautuu wc-istuimen ulkoreunaan kiinni ja korottaja asettuu paikoilleen
5. Tarkista että korottaja on tukevasti paikoillaan
6. Wc-korottaja on käyttövalmis



Wc-korottajan irrotus ja kiinnittäminen tapahtuu löysäämällä tai kiristämällä kiinnitystallojen ruuveja

Wc-korottajan poistaminen:

Löysää wc-korottajan kiinnitystalloja kiertämällä ruuveja. Kiinnitystallat irtoavat ja voit nostaa wc-korottajan pois wc-istuimesta.

TARKISTA KIINNITYSTALLOJEN KIREYS SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJAIN.

KÄYTTÖOHJE WC-KOROTTAJA IRROTETTAVA