

Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata asennusohjetta. Huolellinen asennus takaa turvallisen käytön.

Nousutuki koostuu:

- A) Ylätuki
- B) Kiinnitysosa
- sormiruuvi

Käytä tuotteen kiinnittämiseen 8 kappaletta ruuveja tai läpipultteja riippuen sängynlaidan lujudesta.

Asennusohje:

1. Irrota laitakiinnitysosa varsinaisesta tukiosasta

2. Kiinnitä laitakiinnitysosa sängynlaitaan n. 60 cm - 80 cm:n etäisyydelle pään puoleisesta sängynpäädyistä (suositussijainti; voidaan asentaa myös käyttäjän omakohtaisen tarpeen mukaiseen kohtaan). Kiinnitä laitakiinnitysosa kahdeksalla (8) ruuvilla tai läpipulteilla riippuen sängynlaidan lujudesta.

3. Avaa laitakiinnitysosan sormiruuvia sen verran, että tuki liikkuu korkeussuunnassa, vaihda tarvittaessa "kätisyys" siten, että ylätuken pidempi pää on jalkapäätyyn päin.

4. Kiristä laitakiinnitysosan sormiruuvi

5. Tarkista vielä, että nousutuki on tukevasti kiinni.

- **Nousutuki on käyttövalmis**

Nousutukeen lattiatuen asentaminen (lisävaruste):

Ruuvikiinnitteiseen nousutukeen on saatavilla lisävarusteena erillinen lattiatuki.

- Laita nousutuen ylätuki lattiatuen putkeen.
- Asenna muoviliuskat sängyn ja sen puolen jalkojen alle, johon nousutuki kiinnitetään (toinen jalka- ja toinen pääpuolen jalkojen alle).
- Kiristä lattiatuki joko valmiiksi asennetulla sormiruuvilla tai käytä lattiantuen lisävarustepussissa olevaa kuusiokoloruuvia.
- Poista muoviliuskat sängynjalkojen alta, kun asennus on valmis.

Huom! Jos käytät lattiatukea, huomaa että ylätuki on asennettava siten, ettei varoraja merkki tule näkyviin lattiatuen sisältä. Lattiatuen alla ei saa olla mattoa.

KIINNITYKSEN LUJUUS RIIPPUU SÄNGYN RUNGON PUUOSIEN RAKENTEESTA. EPÄVARMOISSA TAPAUKSISSA KANNATTAA NOUSUTUKI VARMISTAA AINA LATTIATUELLA.

HUOM!

Ylätuen alareunaan (5 cm) on merkitty varoraja merkintä (reikä). Ylätuki on asennettava siten, että merkintä jää näkyviin laitakiinnitysosan alapuolelle.



NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN

TAI SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA! Kielto ei koske pumpulla toimivia painehaavapatjoja. Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!

KÄYTTÖOHJE NOUSUTUET
654 100R | 654 120R