

Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata asennusohjetta. Huolellinen asennus takaa turvallisen käytön.

Tuotteen mukana toimitettava asennussarja sisältää, 2 kpl ohutta muoviliuskaa, 5 mm:n kuusiokoloavaimen ja ruuvin. Lattiatukeen on asennettu valmiiksi sormiruuvi.

Nousutuki koostuu:

- A) Ylätuki
- B) Kiinnitysosa
- C) Lattiatuki

Asennusohje:

1. Asenna muoviliuskat sängyn ja sen puolen jalkojen alle, johon nousutuki kiinnitetään (toinen jalka- ja toinen pääpuolen jalkojen alle).

2. Avaa sormiruuveja sen verran, että tuki liikkuu korkeussuunnassa, vaihda tarvittaessa "kätisyys" siten, että yläputken pidempi pää on jalkapäätyyn päin.

3. Aseta laitakiinnitysosa sängynlaitaan n. 60 - 80 cm:n etäisyydelle pään puoleisesta päädyistä (suositussijainti; voidaan asentaa myös käyttäjän omakohtaisen tarpeen mukaiseen kohtaan) ja kiristä kiinnitystassut sormiruuveilla 1 ja 2. (Kiristä vuorotellen kireäksi)

4. Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysosaa sormiruuvi 3.

5. Kiristä lattiatuen sormiruuvi. Vaihtoehtoisesti voit asentaa lattiatuen tarvikepussissa olevalla ruuvilla ja kiristää sen kuusiokoloavaimella.

6. Tarkista kaikki kiristykset 1,2, 3 ja 4.

7. Poista muoviliuskat sängynjalkojen alta.


8. Tarkista vielä, että nousutuki on tukevasti kiinni.

- Nousutuki on käyttövalmis

TARKISTA KIINNITYSTASSUJEN JA PIDÄTINRUUVIEN KIREYS SÄÄNNÖLLISIN VÄLEIN. HUOM! LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA.

NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN TAI SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA! Kielto ei koske pumpulla toimivia painehaavapatjoja. Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!

HUOM!
Ylätuen alareunaan (5cm) on merkitty varoraja merkintä (reikä). Ylätuki on asennettava siten, ettei merkintä tule näkyviin lattiatuen yläpuolelle.

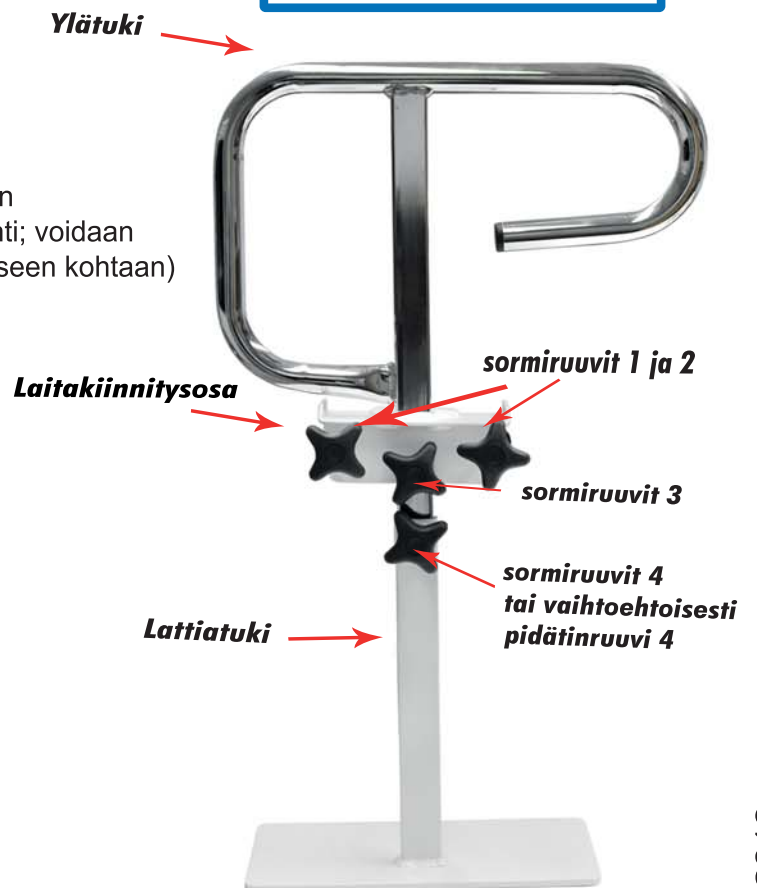

KÄYTTÖOHJE NOUSUTUET

654 100S | 654 200S | 654 120S | 654 220S