

Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata asennusohjetta. Huolellinen asennus takaa turvallisen käytön.

Tuotteen mukana toimitettava asennussarja sisältää, 2 kpl ohutta muoviliuskaa, 5 mm:n kuusiokoloavaimen ja ruuvin. Lattiatukeen on asennettu valmiiksi sormiruuvi.

Nousutuki koostuu:

- A) Ylätuki
- B) Kiinnitysosa
- C) Lattiatuki

### Asennusohje:

1. Asenna muoviliuskat sängyn ja sen puolen jalkojen alle, johon nousutuki kiinnitetään (toinen jalka- ja toinen pääpuolen jalkojen alle)

2. Avaa pidätinruuveja sen verran, että tuki liikkuu korkeussuunnassa, vaihda tarvittaessa "kätisyys" siten, että yläputken pidempi pää on jalkapäätyyn päin.

3. Aseta laitakiinnitysosa sängynlaitaan n. 60 - 80 cm:n etäisyydelle pään puoleisesta sängynpäädyestä (suositussijainti; voidaan asentaa myös käyttäjän omakohtaisen tarpeen mukaiseen kohtaan). Kiristä kiinnitystassut 1 ja 2 kuusiokoloavaimella. (Kiristä vuorotellen kireäksi)

4. Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysojan pidätinruuvi 3 kuusiokoloavaimella.

5. Kiristä lattiatuen sormiruuvi. Vaihtoehtoisesti voit asentaa lattiatuen tarvikepussissa olevalla ruuvilla ja kiristää sen kuusiokoloavaimella.

6. Tarkista kaikki kiristykset 1, 2, 3 ja 4.


7. Poista muoviliuskat sängynjalkojen alta.

8. Tarkista vielä että nousutuki on tukevasti kiinni.

**-Nousutuki on käyttövalmis**

**TARKISTA KIINNITYSTASSUJEN JA PIDÄTINRUUVIEN KIREYS SÄÄNNÖLLISIN VÄLEIN.  
HUOM! LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA.**

**NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN  
TAI SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA!** Kielto ei koske pumpulla toimivia painehaavapatjoja. Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!

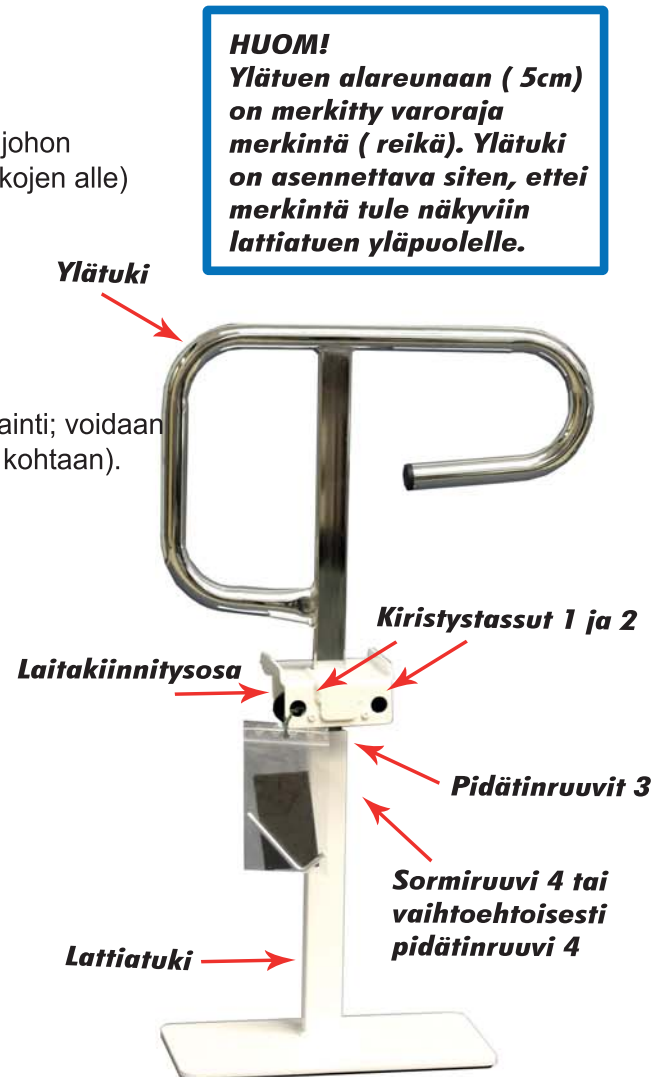

## KÄYTTÖOHJE NOUSUTUET

**654 100 | 654 200 | 654 120 | 654 220**