

**Lue tämä ohje huolellisesti ja noudata asennusohjetta.
Huolellinen asennus takaa turvallisen käytön.**

Pakettiin kuuluu yksi vapaasti seisova wc-korottaja täysin käyttövalmiina.
Tuotteen ympäriltä tarvitsee ainoastaan poistaa pakkausmateriaalit.
Et tarvitse työkaluja asentaessasi korottajaa. Wc-korottaja sopii useimpiin wc-istuin malleihin

Asennuohjeet:

1. Säädä wc-korottaja toivotulle korkeudelle.
Tarkista että korkeudensäädön pikalukitusklipsit ovat tiukasti paikoillaan.
2. Aseta korottaja wc-istuimen päälle.
Tarkista että korottaja on tukevasti paikoillaan.
Tasausjalalla voidaan säätää vakautta kaltevalla pinnalla.
3. Aseta tarvittaessa nauha tukemaan kantta takaa.
4. Wc-korottaja on käyttövalmis.

Varaosaluettelo:

1	Ämpäri	326105
2	Kansi	V326100-1
3	Rengas	V326100-2
4	Roiskesuoja	V326100-3
5	Nauha	OAH75
6	Jalka	V326100-4
7	Säätöjalka	V326100S-4
8	Kumitulppa	OMO27
9	Pikalukko	OMO72



KÄYTTÖOHJE WC-KOROTTAJA VAPAASTI SEISOVA