



Ohjekirjamme ovat ladattavissa myös sähköisesti osoitteessa:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

Tai oheisen QR-koodin kautta



Tukimet Oy
Kaivopuistontie 33
26100 RAUMA
FINLAND

02 677 4222
www.tukimet.fi
tukimet@tukimet.fi

WC-KOROTTAJA KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ **336 180** **KÄYTTÖOHJE**



Tukimet Oy | Kaivopuistontie 33 | 26100 RAUMA | www.tukimet.fi



WC-korottaja toimitetaan paketissa valmiiksi koottuna, vain käsinojat tarvitsee naksauttaa pakoilleen. Pikalukot ovat kiinni korottajassa.

Asennusohjeet:

1. Poista rengas ja kansi wc-istuimestasi (useimissa malleissa irrotus tapahtuu nostamalla).

2. Irrota kiinni olevat pikalukkokiinnittimet seuraavasti:

Löysää pikalukkoa kiertämällä sitä muutaman kerran vastapäivään. Ota kiinni pikalukon yläosasta kuvassa 1 esitetyllä tavalla, purista voimakkaasti ja vedä sitä alaspäin, jolloin pikalukko naksauttaa ja saat sen vedettyä pois tapista (kuva 2).

(Huomaa, että pikalukko ei irtoa, jos yrität vetää sitä liian alhaalta alaspäin. Ota pikalukosta kiinni ylhäältä.)

3. Korkeussäätö tapahtuu korottajan takana mustien pikaruuvien avulla (kuva 3). Irrota ruuvit takaputkesta molemmilta puolilta korottajaa. Poista kumitulppa ja aseta putki halutulle korkeudelle ja kiristä ruuvit takaisin kiinni takaputkeen. Säädä korkeus myös edestä poistamalla isot valkoiset nupit (kuva 4) ja irrottamalla pultit sisäosan etuputkesta, jolloin putken saa nostettua tai laskettua (kuva 5). Kun korottaja on halutussa korkeudessa, kiristä pultit putkeen kiinni ja laita nupit sekä kumitulpat paikoilleen (kuva 5).



kuva 3



kuva 4



kuva 5



kuva 6



kuva 1



kuva 2

4. Aseta käsituet nostamalla niiden pää reikään, jolloin pikalukko naksauttaa.



5. Säädä kiinniketapit sopivalle etäisyydelle toisistaan siten, että ne sopivat wc-istuimesi reikiin.



Aseta korottaja wc-istuimeesi siten että kiinniketapit näkyvät alta ja ne ovat suorassa.



6. Aseta pikalukkokiristimet kiinniketappeihin työntämällä ylös asti, jolloin lukko naksauttaa kiinni. Kiristä vielä lukkoa kiertämällä myötäpäivään ja tarkista että kiristimet ovat hyvin paikoillaan.

(Huomaa että pikalukkokiristin pitää olla 'auki' kun asetat pikalukot takaisin kiinniketappeihin, Katso tarvittaessa ohje kohta 2.)

7. WC-korottaja on valmis käytettäväksi. Halutessasi voi nostaa käsituet pois tieltä tai poistaa ne kokonaan.



WC-korottajan poistaminen:

Poisto tapahtuu vapauttamalla ohjeen kohdan 2 mukaisesti pikakiristinlukot ja nostamalla korottajan pois.