

KÄYTTÖOHJEET

Kävelykepit sekä kyynär- ja kainalosauvat

Tuotteen vääränlainen käyttö tai säätö saattavat johtaa tuotteen tai käyttäjän yllärasitukseen. Henkilökunnan tulee säätää tuote sopimaan käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin.

Pidä tuotetta mahdollisimman lähellä kehoasi liikuessasi välttääksesi onnettomuuksia. Liiku eteenpäin rauhallisesti ja lyhyin askelin pitääksesi tasapainosi.

Kyynärsauvat ja kävelykepit:

Kyynärsauvan ja/tai kävelykepin pituus tulee säätää käyttäjälleen sopivaksi. Irroita pikalukitusklipsi, säädä sisempi putki sopivaan korkeuteen ja paina klipsi takaisin paikalleen.

Kävelykeppi Walker Soft: Paina korkeussäätönappula rungon sisään ja valitse haluttu korkeus.

Varmista aina, että korkeussäätö on kunnolla kiinni!
Varo, ettet jätä sormiasi tai muita kehon osia väliin tuotetta käsitellessäsi.



Kainalosauva Black:


Kainalosauva tulee säätää käyttälleen sopivaksi.

Korkeus säädetään painamalla tuotteen putkien läpi menevä painike molemmilta puolilta putken sisään ja asettamalla sitten haluttu korkeus.

Varmista, että korkeussäätö lukkiutuu ja säädön tappi on näkyvässä molemmin puolin putkea.

Otekahvan korkeutta saa säädettyä avaamalla ja poistamalla siipimutterin ja vetämällä toiselta puolelta kahvan läpi menevän pultin ulos. Aseta kahva haluttuun korkeuteen ja paina pultti taas läpi kainalosauvan runkoputkesta, kahvaosasta ja taas toisesta putkesta, niin että kahva on vaakasuorassa.

Kiristä siipimutteri ja varmista, että se on kunnolla kiinni!

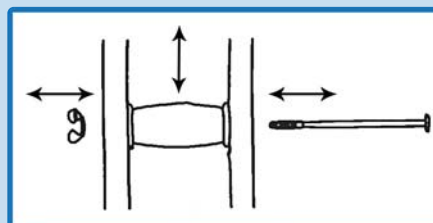

**330120 | 340130 | 330131 | 330150 | 340145 | 340145S | 340245
340140 | 340141 | 340136 | 340137 | 340138 | 340147 | 340148**

Tyke® -kainalo- ja kyynärsauvojen sekä kävelykeppien huolto-ohjeet

Tuote tulisi huoltaa vähintään **12 kuukauden välein**. Suoritettavat toimenpiteet aina tuotteen palautuessa käyttäjältä tai tuotteen huoltoon saapuessa:

1. PESU ja KUIVAUS

Tuote tulee puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee puhtaalla vedellä ja kuivaa sitten kankaalla.

Tarkasta, ettei vettä jää putken sisään!

Vaikeiden tahrojen poistoon suositellaan käytettäväksi rasvaa liuottavia puhdistusaineita, ph-arvo 5-9 tai 70% desinfiointiainetta. Pesulämpötila max. 80°C.

HUOM!

Älä koskaan käytä öljyisiä aineita! Liukastumisvaara!

Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä tai -aineita, äläkä vahvoja liuottimia!

2. TARKASTA

Kumitulppa tulee tarkistaa ja vaihtaa, jos se on vioittunut tai siinä on paljon kulumaa.

Poista kumi-tulppa vetämällä se irti putkesta. Asenna uusi kumitulppa painamalla putki tulpan pohjaan asti. Varmista aina, että kumitulpan koko ja malli on oikea!

Jos tuotteeseen on asennettu jääpiikki, tarkista myös jääpiikin kunto. Varmista, että kiinnitys pitää ja ruuvit ovat tarpeeksi kireät. Tarkista, että piikki on tarpeeksi terävä. Vioittunut tai kulunut jääpiikki tulee vaihtaa uuteen.

Taipunutta tai vahingoittunutta tuotetta ei saa käyttää. Tuotetta ei saa yrittää korjata suoristamalla, sillä sen rakenne saattaa heikentyä ja se saattaa katketa.

Korjauksissa ja huolloissa **tulisi käyttää vain Tyke®-alkuperäisvaraosia**.

Käyttämällä Tyke®-alkuperäisvaraosia varmistat CE-hyväksynnän sekä takuun voimassaolon.