

## HEMITYÖNTÖAISAN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN



Irrota kahvan päällä  
olevat 2 ruuvia (Torx 20).


Vedä putket erilleen ja irrota  
kahvaosa.

Käännä kahva niin että vipu  
osoittaa haluttuun suuntaan  
(kätisyys).

Nro 1 reikiä käytettäessä kahva  
tulee täysin kohtisuoraan alaspäin  
ja reikiä nro 2 käytettäessä  
kahva on hieman käyttäjästä  
pois päin vinossa, tämä on usein  
ranteelle mukavampi asento.

Paina kahva siihen putkeen,  
jonka sisään kulkee toinen  
pienempi putki. Varmista, että  
putkissa ja kahvassa olevat reiät  
ovat kohdikkain.

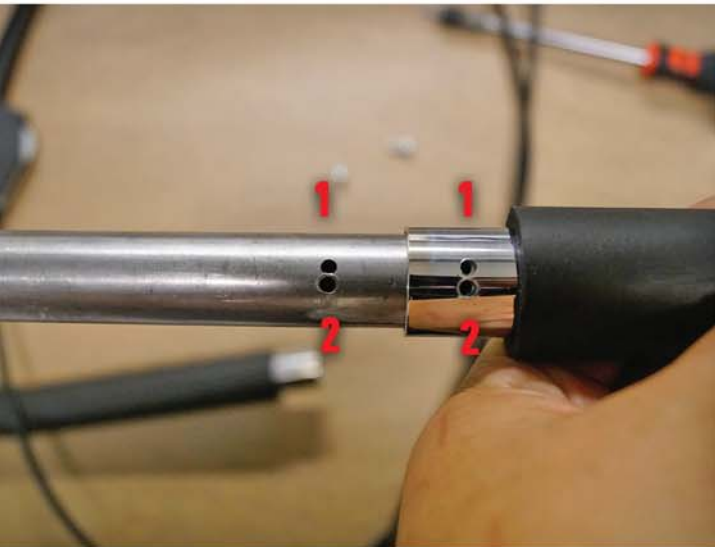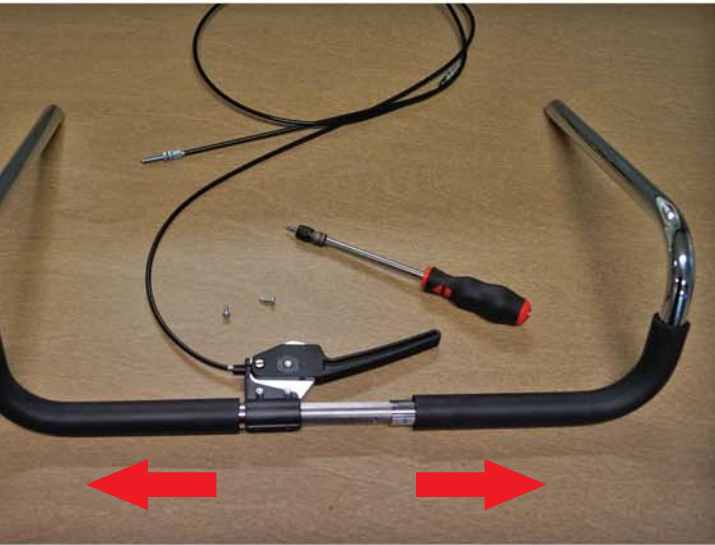

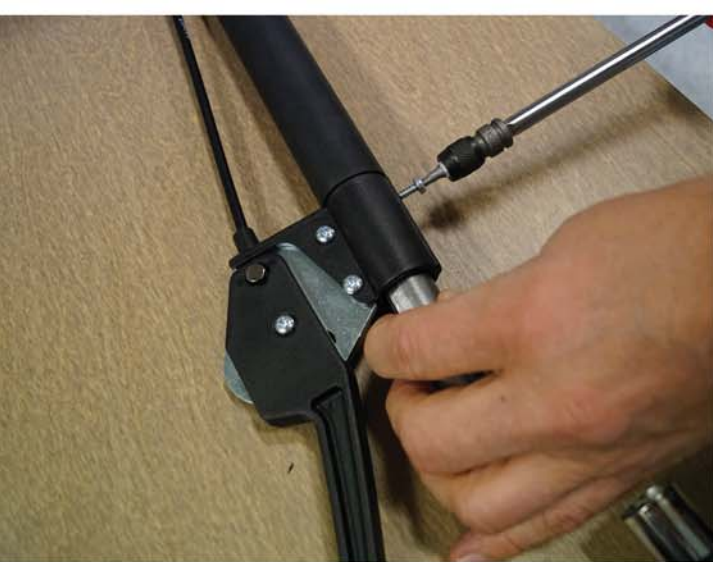

Paina kahva aivan kiinni aisaosan pehmusteeseen. Kiristä ensin pehmustetta lähempänä oleva ruuvi pohjaan asti.



Aisan tulisi tässä vaiheessa näyttää tältä.



Paina putket yhteen ja niin pohjaan, että kahvan muoviosan toinen pää on kiinni toisen aisaosan pehmusteessa. Kohdista reiät!



Kiristä toinenkin ruuvi pohjaan asti. Hemikahva on nyt käyttövalmis.