


## Asennusohjeet:

1. Poista kaikki tuotteen osat pakkauksesta.
2. Aseta selkänoja sisään takaosan putkiin ja kiristä käsipyörillä (kuva 1).
3. Asenna jalkatuet: tuen ylin kiinnike painetaan alas sisään rungon putkeen, niin että jalkalauta on sivuttain runkoon nähden. Seuraavaksi kiepsautetaan jalkatuki keskustaan päin kunnes se lukkiutuu paikalleen ja kuuluu "klik" ääni. Sama toistetaan toisella jalkatuella. (kuva 2)

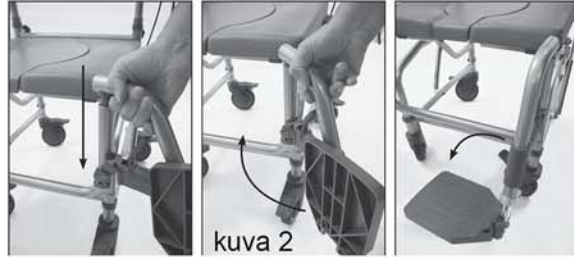

### Korkeussäädettävät mallit:


Asenna pyörät tuolin jalkojen putkiin, säädä korkeus sopivaksi ja lukitse pikalukitusklipsillä. Tarkista, että klipsi menee tiukasti kiinni (kuva 3).



Pakkauksesta löytyy vaihtoehtoisesti myös kiinnityspultit renkaiden pysyvämpään asentukseen.

### Kallistettava suihkutuoli:

Aseta niskatuki sisään työntökahvan keskellä olevaan mustaan kannattimeen, säädä oikeaan asentoon ja kiristä käsipyörällä (kuva 4). Ylemmällä käsipyörällä säädetään niskatuen etäisyyttä. Kallistettavan suihkutuolin kallistuskulmaa saadaan säädettyä tuolin takaa löytyvästä kahvasta (kuva 5) Purista kahvaa: jännite vapautuu ja tuolin kallistusta voidaan säätää. Irrota kahvasta kun tuoli on halutussa asennossa. Asento lukkiutuu.

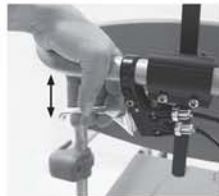

**HUOM!** Jos käyttäjä istuu tuolissa yksinään pidemmän aikaa, tulee pyörät lukita niin, että ne osoittavat pois päin tuotteesta ja antavat näin paremman pidon.

## KÄYTTÖOHJE PYÖRÄLLINEN SUIHKUTUOLI SIIRI

**345305 | 345310  
345312 | 345315 | 345316**



Tukimet Oy | Kaivopuistontie 33 | 26100 RAUMA

# Siiri suihkupyörätuolit

## Varaosaluettelo:

Siiri-pyörällinen suihkutuoli on kätevä apu suihkutiloissa. Hygieniaistumellinen, pyörällinen suihkutuoli on laadukas ja vastaa niin yksityishenkilön kuin osastonkin tarpeita. Laadukas polyuretaani istuin kestää kulutusta ja tuntuu miellyttävältä iholla. Istuin tulee irrotettavan kannen kanssa. Siirin saa laitettua pienempään tilaan irrotettavan selkänöjan ansiosta. Käsinojat voidaan kääntää ylös ja jalkatuet voidaan siirtää sivuille. Laaja varaosa tarjonta tekee suihkupyörätuolista kestäväen ratkaisun.

### Puhdistusohjeet:

Suihkutuoli tulee puhdistaa säännöllisesti miedolla puhdistusaineella (PH 8-12) ja pyyhkiä kostealla pehmeällä liinalla. Vaikeiden tahrojen poistoon suositellaan käytettäväksi rasvaa liuottavia puhdistusaineita. Alkoholi pohjaiset desinfiointiaineet tulee laimentaa suhteessa 1:4.

Suihkutuoli voidaan asettaa matalalla paineella juoksevan veden alle tai suihkutella puhtaaksi. Älä käytä rajusti hankaavia materiaaleja tai valkaisuaineita välttääksesi kulumisen ja värin haalenemisen.

Tuote voidaan pestä koneessa 85 asteessa korkeintaan 1 minuutin ajan.

Tukimet Oy | Kaivopuistontie 33 | FI-26100 Rauma  
02 677 4222 | [www.tukimet.fi](http://www.tukimet.fi) | [tukimet@tukimet.fi](mailto:tukimet@tukimet.fi)



Nimike:	Tuotekoodi:
1 Korkeussääd. etu/takapyörä	345209
2 Jalkalauta täydellinen	345207
3 Jalkalauta varrella	345207V
4 Alusastia	345211
5 Istuinaukon suojus	345213
6 Istuin	345214
7 Selkänöja ja käsinojat	345215
8 Päätuki täydellinen	345216
9 Kaasujousi	345217
10 Siiri omatoiminen, pikalukituspyörä & tarv.	345203
11 Siiri omatoiminen, takapyörä & tarvikkeet	345204
12 Etupyörä 125 mm (ei jarrua)	345205E
13 Takapyörä 125 mm jarrulla	345206
14 Etupyörä 125 mm jarrulla	345206E
15 Verkkoselkänöja	345202

