

Tuotteen mukana toimitettava asennussarja sisältää, 2 kpl ohutta muoviliuskaa, 5 mm:n kuusiokoloavaimen ja -ruuvien. Lattiatukeen on asennettu valmiiksi sormiruuvi.

**Asennusohje: 654100 | 654200 | 654120 | 654220**

Irrota laitakiinnitysosa, ylätuki ja lattiatuki toisistaan löysentämällä kuusiokoloruuveja 1-3 sekä lattiatuen sormiruuvia 4. Asenna muoviliuskat sängyn sen puolen jalkojen alle, johon nousutuki kiinnitetään (yksi kummankin jalan alle).

Aseta laitakiinnitysosa sängynlaitaan noin 60-80 cm:n etäisyydelle pään puoleisesta sängynpäädyistä (suositussijainti; voidaan asentaa myös käyttäjän omakohtaisen tarpeen mukaan). Laitaosa voidaan asettaa sängynlaidan yläreunan lisäksi myös toisin päin käännettäessä alareunaan, esimerkiksi kun kyseessä on runkopatjasänky.

Kiinnitä laitaosa kiristystassuja 1 ja 2 kuusiokoloavaimella kiristämällä. Aseta lattiatuki linjaan laitaosan aukon kanssa ja aseta ylätuki paikoilleen laitaosan läpi lattiatuen sisään niin, että ylätuen pidempi pää on jalkapäätyyn päin. Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysosan kuusiokoloruuvi 3 sekä lattiatuen sormiruuvi 4. Vaihtoehtoisesti voit asentaa lattiatuen tarvikepussissa olevalla ruuvilla ja kiristää sen kuusiokoloavaimella.

Tarkista kaikki kiristykset. Poista muoviliuskat sängynjalkojen alta. Tarkista vielä, että nousutuki on tukevasti kiinni.

**HUOM! NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN TAI SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA!** Kielto ei koske pumpulla toimivia painehaavapatjoja. Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!


**HUOM! LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA.**

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:  
[www.tukimet.fi/ohjekirjat](http://www.tukimet.fi/ohjekirjat)

**Katso asennus-  
video YouTubessa:**



Tarkista kiinnitystassujen ja pidätinruuvien kireys säännöllisin välein. Pidä nousutuki puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaamossasi!

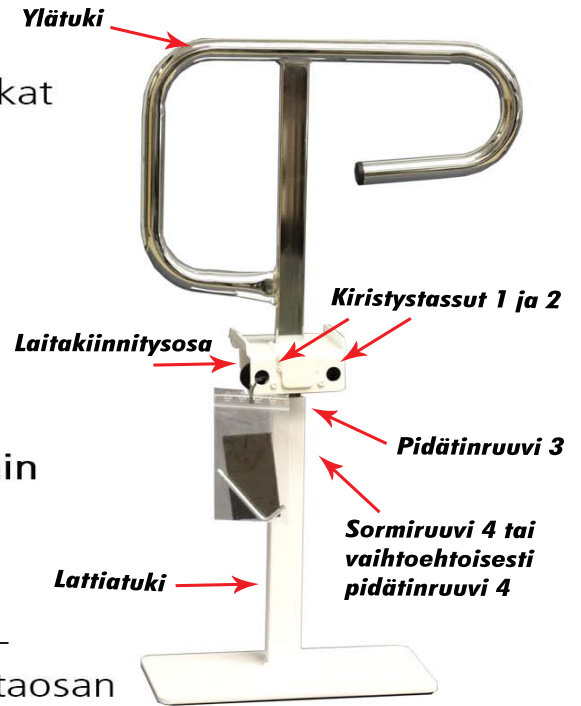

**HUOM!**  
Ylätuen alareunaan (5cm) on merkitty varoraja merkintä (reikä). Ylätuki on asennettava siten, ettei merkintä tule näkyviin lattiatuen yläpuolelle.