


Käytä tuotteen kiinnittämiseen 8 kappaletta ruuveja tai läpipultteja riippuen sängynlaidan lujuudesta. (HUOM! Ei sisälly tuotteeseen!)

Asennusohje: 654100R | 654120R

Avaa **sormiruuvi** ja irrota laitakiinnitysosa varsinaisesta tukiosasta. Kiinnitä laitakiinnitysosa sängynlaitaan n. 60 cm-80 cm:n etäisyydelle pään puoleisesta sängynpäädyistä (suositussijainti; voidaan asentaa myös käyttäjän omakohtaisen tarpeen mukaisesti). Kiinnitä laitakiinnitysosa kahdeksalla (8) ruuvilla tai läpipulteilla riippuen sängynlaidan lujuudesta.

Aseta varsinainen tukiosa takaisin laitakiinnitysosan sisään siten, että ylätuen pidempi pää on jalkapäätyyn päin. Valitse sopiva korkeus ja kiristä laitakiinnitysosan sormiruuvi. Tarkista vielä, että nousutuki on tukevasti kiinni.

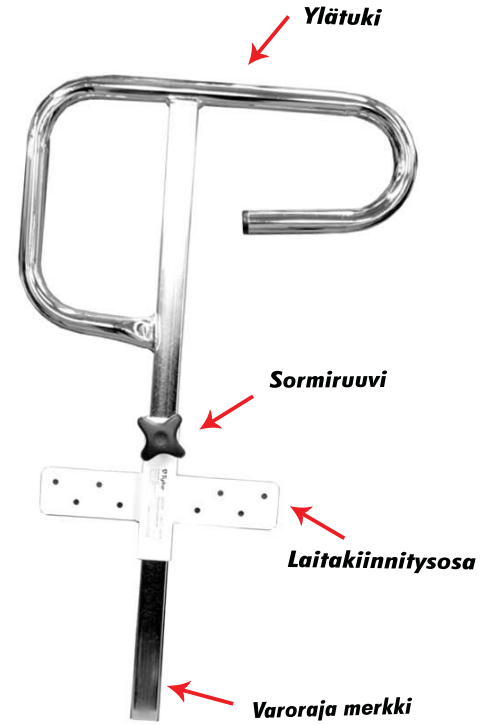

KIINNITYKSEN LUJUUS RIIPPUU SÄNGYN RUNGON PUUSIEN RAKENTEESTA. JOS MAHDOLLISTA, SUOSITTELEMME ASENTAMAAN MYÖS LATTIATUEN.

Nousutukea on saatavilla valmiiksi lattiatuellisena tai lattiatuen voi hankkia lisävarusteena.

654100RJ | 654120RJ | 654200RJ | 654220RJ

Asenna muoviliuskat sängyn sen puolen jalkojen alle, johon nousutuki kiinnitetään (yksi kummankin jalan alle). Avaa laitaosan ja lattiatuen sormiruuveja sen verran, että tuki liikkuu korkeussuunnassa. Vaihda tarvittaessa ylätuen "kätisyys." Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysosan sormiruuvi sekä lattiatuen sormiruuvi. Kiinnitä laitaosa kahdeksalla ruuvilla tai pultilla sängynlaitaan. Poista muoviliuskat jalkojen alta. Tarkista kiinnitys.

HUOM!

Ylätuen alareunaan (5cm) on merkitty varoraja merkintä (reikä). Ylätuki on asennettava siten, ettei merkintä tule näkyviin lattiatuen yläpuolelle.



HUOM! NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN TAI SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA! Kielto ei koske pumpulla toimivia painehaavapatjoja. Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!

HUOM! LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA.

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**Katso asennus-
video YouTubessa:**



Tarkista kiinnitystassujen ja pidätinruuvien kireys säännöllisin välein. Pidä nousutuki puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaamossasi!