

Tuotteen mukana toimitettava asennussarja sisältää, 2 kpl ohutta muoviliuskaa, 5 mm:n kuusiokoloavaimen ja -ruuvin. Lattiatukeen on asennettu valmiiksi sormiruuvi.


Asennusohje: 654100S | 654200S | 654120S | 654220S

Irrota laitakiinnitysosa, ylätuki ja lattiatuki toisistaan löysentämällä sormiruuveja 1-4. Asenna muoviliuskat sängyn sen puolen jalkojen alle, johon nousutuki kiinnitetään (yksi kummankin jalan alle).

Aseta laitakiinnitysosa sängynlaitaan noin 60-80 cm:n etäisyydelle pään puoleisesta sängynpäädyistä (suositussijainti; voidaan asentaa myös käyttäjän omakohtaisen tarpeen mukaan). Laitaosa voidaan asettaa sängynlaidan yläreunan lisäksi myös toisin päin käännettäessä alareunaan, esimerkiksi kun kyseessä on runkopatjasänky.

Kiinnitä laitaosa sormiruuveja 1 ja 2 kiristämällä. Aseta lattiatuki linjaan laitaosan aukon kanssa ja aseta ylätuki paikoilleen laitaosan läpi lattiatuen sisään niin, että ylätuen pidempi pää on jalkapäätyyn päin. Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysojan sormiruuvi 3 sekä lattiatuen sormiruuvi 4. Vaihtoehtoisesti voit asentaa lattiatuen tarvikkepussissa olevalla ruuvilla ja kiristää sen kuusiokoloavaimella.

Tarkista kaikki kiristykset. Poista muoviliuskat sängynjalkojen alta. Tarkista vielä, että nousutuki on tukevasti kiinni.

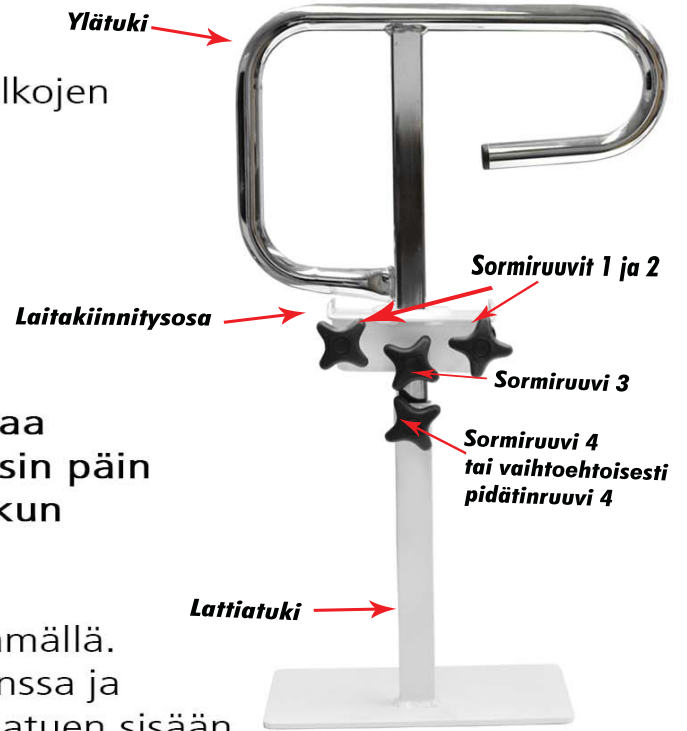

HUOM!
Ylätuen alareunaan (5cm)
on merkitty varoraja
merkintä (reikä). Ylätuki
on asennettava siten, ettei
merkintä tule näkyviin
lattiatuen yläpuolelle.

HUOM! NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA MOOTTOROITUIHIN SÄNKYIHIN TAI SÄNKYIHIN, JOISSA ON MOOTTOROITU PATJA! Kielto ei koske pumpulla toimivia painehaavapatjoja. Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!

HUOM! LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA.

Tuotteidemme kattavammat
käyttöohjeet löydät täältä:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**Katso asennus-
video YouTubessa:**



Tarkista kiinnitystassujen ja pidätinruuvien kireys säännöllisin välein. Pidä nousutuki puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaamossasi!