

Tuotteen mukana toimitettava asennussarja sisältää 2 kpl ohutta muoviliuskaa, 5 mm:n kuusiokoloavaimen ja ruuvien. Lattiatukeen on asennettu valmiiksi sormiruuvi.

Asennus: **655120R | 655220R | 655120S | 655220S**

Irrota laitakiinnitysosa, ylätuki ja lattiatuki toisistaan löysentämällä sormiruuveja. Asenna muoviliuskat sängyn sen puolen jalkojen alle, johon nousutuki kiinnitetään (yksi kummankin jalan alle).

Aseta laitakiinnitysosa sängynlaitaan moottoroidun noston taitekohtaan (tai lähemmäs jalkopäätä).

Tuotetta ei tule asentaa taitekohdasta katsoen lähemmäs pääpuolen sängyn päätä - PURISTUMISVAARA!

Kiinnitä tuotteesta riippuen laitakiinnitysosa joko sormiruuveja kiristämällä tai kahdeksalla ruuvilla. Aseta lattiatuki linjaan laitaosan kanssa ja laita ylätuki paikoilleen niin, että siinä oleva ura on kohdillaan laitaosan kanssa. **Nousutuen ylätuki on kolmeen eri suuntaan kääntyvä. Tukea ei tule asentaa niin, että ylätuen saa käännettyä sängyn yläpuolelle - PURISTUMISVAARA!** Ylätuen tukiputki itsessään on muotoiltu niin, ettei tämä myöskään ole mahdollista. Säädä korkeus sopivaksi ja kiristä laitakiinnitysosan sormiruuvi sekä lattiatuen sormiruuvi. Vaihtoehtoisesti voit asentaa lattiatuen tarvikepussissa olevalla ruuvilla ja kiristää sen kuusiokoloavaimella.

Poista muoviliuskat jalkojen alta. Tarkista, että nousutuki on tukevasti kiinni.

HUOM!

- * **LATTIATUEN ALLA EI SAA OLLA MATTOA!**
- * **MOOTTOROIDUN SÄNGYN KAUKOSÄÄDINTÄ EI SAA SÄILYTTÄÄ SÄNGYSSÄ!**
- * **NOUSUTUKEA EI SAA ASENTAA SÄNKYIHIN, JOISSA ON ERILLINEN MOOTTOROITU KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ PATJA!** Kielto ei koske pumpulla toimivia painehaavapatjoja. Epäselvissä tilanteissa varmista soveltuvuus!

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**Katso asennus-
video YouTubessa:**



Tarkista kiinnitystassujen ja pidätinruuvien kireys säännöllisin välein. Pidä nousutuki puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaamossasi!



**HUOM! Ylätuen alareunaan (5cm) on merkitty varo-
rajamerkintä (reikä). Ylätuki on asennettava siten,
ettei merkintä tule näkyviin lattiatuen yläpuolelle.**