

### **Käyttöönotto:**

Lukitse työntöaisat sopivaan korkeuteen käsipyörällä. Käsipyörät on kiristettävä niin tiukoiksi, että aisojen asento ei muutu käytössä.

#### **HUOM!**

- \* Työntöaisojen suurin sallittu korkeus: neljäs piste ei saa jäädä näkyviin runkoputken yläpuolelle.
- \* Työntöaisojen suurin sallittu sivuttaissäätökulma on 0°.
- \* Tarkista jarrujen toiminta aina ennen laitteen käyttöä. Varmista myös, että laite on lukkiutunut käyttöasentoon ja että kaikki pyörät ovat tasaisesti maassa eikä rungossa ei ole vääristymiä!



### **Pysäköintijarru:**

Paina molemmat jarrukahvat alaspäin. Kahvat napsahtavat lukkoon.

Lukitse jarrut aina, kun käytät rollaattoria istuimena.

### **Käyttöjarru:**

Vedä ylöspäin jarruttaaksesi.




### **Kokoontaittaminen:**

Löysää työntöaisojen käsipyörät, laske aisat alimpaan asentoon ja käännä keskelle laitetta. Kiristä kiinni. Nosta istuimen alla olevaa lukitusjoustaa ja kallista kävelytelinettä hieman eteenpäin. Takaputki vapautuu ja voit säilyttää/kuljettaa laitetta pienemmässä tilassa.

Nostaessa kävelytelinettä esim. autoon, nosta takaputkesta. Noudata varovaisuutta sekä ergonomista nostotekniikkaa.

**Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin lukitusjousen ja takaputken tai etu- ja takaputkien väliin!**

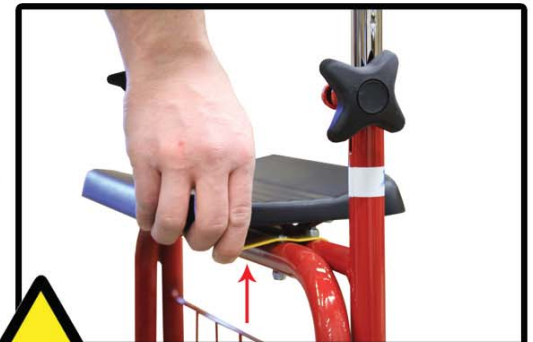

Rollaattorimalliemme kattavammat ohjekirjat löydät täältä: [www.tukimet.fi/ohjekirjat](http://www.tukimet.fi/ohjekirjat)

**Katso käyttöönottovideo YouTubessa:**



*Tarkista säännöllisesti, että kaikki ruuvit, mutterit ja muut kiinnikkeet ovat asianmukaisesti kiinni ja että jarrujen pitävyys on kunnossa. Ethän säilytä rollaattoria ulkona. Pidä puhtaana kaikesta liasta, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaamossasi!*