

### **Ibruktagande:**

Lås handtagen i en lagom höjd med muttern. Muttrarna måste spännas fast så att handtaget inte rör sig vid användning.

#### **OBS!**

- \* **Maximal höjd:** Den fjärde punkten får inte överstiga ramrörets ända.
- \* **Rollatorns största tillåtna justeringsvinkel i sidled är 0°.**
- \* **Kontrollera bromsfunktionen före varje användning av rollatorn! Innan du använder rollatorn kontrollera att bromsarna fungerar och att alla hjul har kontakt med marken och att det inte finns snedvridningar i ramen.**



### **Parkeringsbroms:**

Tryck mjukt nedåt för parkeringsläge. Ett tydligt klick indikerar att bromsen är i rätt läge.

**Lås alltid bromsarna innan du sätter dig på rollatorn.**




### **Driftbroms:**

Drag båda bromsarna uppåt för att få bromsarna på tillfälligt.

### **Hopvikning:**

Lossa muttrarna på handtagen, sänk handtagen till det lägsta läget och vrid dem i mitten av rollatorn. Dra åt ordentligt. Lyft spaken under sätet och böj rollatorn en aning framåt. Bakre röret frigörs och du kan förvara/transportera din rollator i ett litet utrymme.

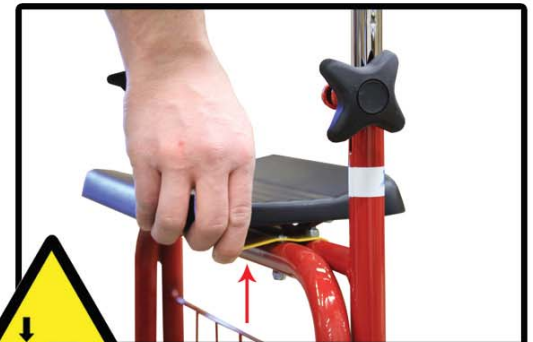

När du lyfter rollatorn, t.ex. in i en bil, lyft den i bakre röret. Var försiktig och använd ergonomisk lyftteknik när du lyfter rollatorn.

**Se till att du inte placerar dina fingrarna eller andra kroppsdelar på sådana delar där de riskerar att bli klämda!**

Mer detaljerad bruksanvisning för våra rollatormodeller hittar du här:

**[www.tukimet.fi/ohjekirjat](http://www.tukimet.fi/ohjekirjat)**



*Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar och andra fästelement är ordentligt åtdragna och att bromsarna håller bra. Håll rollatorn fri från all smuts så att den fungerar normalt. Förvara inte rollatorn utomhus. Kontakta din hjälpmedelsutlåning ifall rollatorn behöver reparation.*