

Istuin:

Aseta istuinosa tuolin runkoon. Paina istuin tukevasti kiinni. Tarkista nostamalla tuolia istuinosa, että se on varmasti kunnolla kiinni runko-osassa. Suihkutuolin etureuna on oheisessa kuvassa etualalla.

HUOM!




* Vältä istumista aivan istuinosa reunalla, jotta istuin ei irtoa rungosta!



Korkeuden säätäminen:

Irrota pikalukot runko-osan jaloista vetämällä pikalukkoa itseäsi kohde. Työnnä korkeudensäätöjalka runko-osaan. Valitse sopiva korkeus ja lukitse korkeudensäätöjalka runkoon työntämällä pikalukko takaisin paikoilleen.

* Varmista, että pikalukot ovat kunnolla kiinni ja että ne lävistävät kokonaan molemmat jalkojen putket.

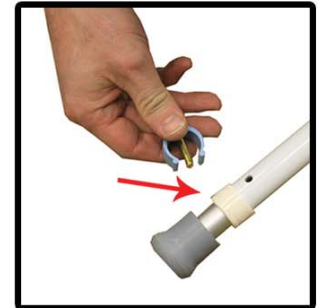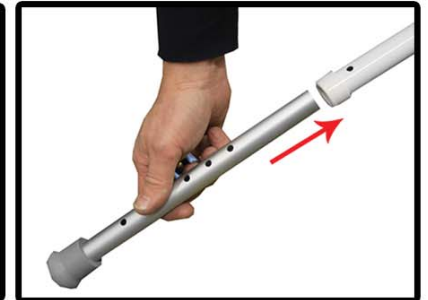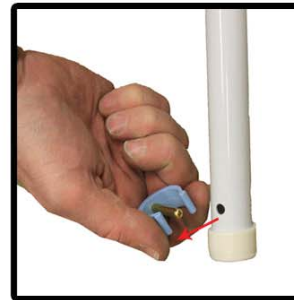

Kallistuksen säätö:


Yksi tuotteen jaloista on kallistuksen säätöjalka, jossa ei ole lainkaan kumitulppaa ja jonka tassullista ruuvia kiertämällä voidaan tasata suihkutilan mahdollista kallistusta.



Selkänoja (lisävaruste):

Aseta selkänojan putket sisään runkoon suoran väliputken puolelta. Selkänojalle on valittavissa kaksi eri syvyyttä. Valitse sinulle sopivampi ja lukitse selkänoja runkoon pikalukoilla.

* Varmista, että pikalukot ovat kunnolla kiinni ja että ne lävistävät kokonaan molemmat putket.

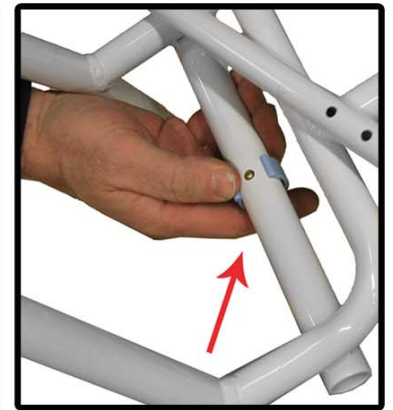

Tuotteidemme kattavammat käyttöohjeet löydät täältä:
www.tukimet.fi/ohjekirjat

**Katso käyttöönotto-
video YouTubessa:**



Tarkista säännöllisesti laitteen yleinen kunto ja kiinnikkeiden pitävyys. Pidä suihkutuoli puhtaana kaikesta liasta pyyhkimällä kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, jotta se pysyy toimintakuntoisena. Huollata viallinen laite omassa apuvälinelainaamossasi!